

**NEU!**

## HALBSEITIGER VERFORMBARER BORDER-LOCK® EINWEG-ABFORMLÖFFEL

DER ERSTE HALBSEITIGE SEMI-INDIVUELLE ABFORMLÖFFEL, DER SICH VON HAND  
INDIVIDUELL VERFORMEN LÄSST



1. DER THERMOPLASTISCHE LÖFFEL WIRD CA. 1 MINUTE IN 70°C WARMES WASSER EINGETAUCHT
2. DANACH WIRD DER LÖFFEL VON HAND INDIVIDUELL DEN ANATOMISCHEN GEGEBENHEITEN DES PATIENTEN ANGEPASST
3. NACH ABSCHLUSS DER INDIVIDUALISIERUNG UND ABKÜHLUNG AUF RAUM-BZW. MUND-TEMPERATUR IST DER ABFORMLÖFFEL WIEDER VÖLLIG STABIL UND VERWINDUNGSSTEIF

Der halbseitige Löffel ist eine gemeinsame Entwicklung von Clan/Schreinemakers mit absolute Ceramics (biodentis GmbH)

- Löffelgröße Nr. 1 für den I. und III. Quadranten
- Löffelgröße Nr. 2 für den II. und IV. Quadranten



- Links: Löffel vorher
- Rechts: Löffel nachher



- Vor der Abformung ist der Löffel mit kaltem Wasser abzukühlen
- Der Löffel kann einhändig positioniert und stabilisiert werden
- Den Löffel im Mund anpassen und eventuell erneut verformen
- nach Abschluss der Individualisierung und Abkühlung auf Raum- bzw. Mundtemperatur ist der Löffel wieder völlig stabil und verwindungssteif

(Bildquelle: absolute Ceramics (biodentis GmbH))

### Erste praktische Erfahrungen von Anwendern:

- “Ist perfekt festzuhalten”
- “Materialsparende Form”
- “Erhöhter Staudruck”
- “Erleichtert die Positionierung und Stabilisierung”
- “Hier hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht”

### Bestellmöglichkeiten für den halbseitigen verformbaren Border-Lock® Einweg-Abformlöffel:

Art.Nr. 5480G

Dose mit 10 halbseitigen Löffeln  
5x Größe Nr. 1 + 5x Größe Nr. 2

**CLAN** 

**Clan Dental Products**

Postleitzahl 2606 - NL-6026 ZG Maarheeze - Niederlande  
Tel +31 495593351 - Fax + 31 495591315  
clan@xs4all.nl - www.borderlock.com