

NIEUW!

HALVE VERVORMBARE BORDER-LOCK® WEGWERP AFDRUKLEPELS

DE EERSTE HALFINDIVIDUELE LEPEL DIE ZICH HANDMATIG LAAT INDIVIDUALISEREN



1. HOUD DE GEKOZEN LEPEL 1 MINUUT IN WATER VANAF 70°C
2. VERVORM DE LEPEL NAAR WENS
3. NA HET INDIVIDUALISEREN WORDT DE LEPEL WEER VOLLEDIG STABIEL

- EEN ONTWIKKELING VAN SCHREINEMAKERS IN SAMENWERKING MET ABSOLUTE CERAMICS (BIODENTIS GmbH)
- PRECIEZE INDIVIDUALISERING DOOR THERMOPLASTISCHE VERVORMBAARHEID
- LEPELMAAT NR. 1 VOOR I. EN III. KWADRANT AFDRUKKEN
- LEPELMAAT NR. 2 VOOR II. EN IV. KWADRANT AFDRUKKEN



- Linker afb.: originele lepel
- Rechter afb.: aangepaste lepel



- Positioneren en stabiel houden met één hand



(Afbeeldingen: absolute Ceramics (biodentis GmbH))

Ervaringen van tandartsen:

- “kan perfect stabiel worden gehouden”
- “Materiaalbesparende vorm”
- “verhoogde stuwdruk”
- “Hier heeft iemand echt over nagedacht”

Bestelmogelijkheden halve vervormbare Border-Lock® wegwerp afdrucklepels:

Art.Nr. 5480G

Doos 10 vervormbare halve lepels
5x maat nr. 1 + 5x maat nr. 2

Leverbaar via Uw dental depot

CLAN 

Clan Dental Products

Postbus 2606 - NL-6026 ZG Maarheeze
Tel +31 495593351 - Fax + 31 495591315
E-mail: clan@xs4all.nl - www.borderlock.com