

NEU!

VERFORMBARE BORDER-LOCK® EINWEG-ABDRUCKLÖFFEL

DER ERSTE SEMI-INDIVIDUELLE ABDRUCKLÖFFEL, DER SICH VON HAND INDIVIDUELL VERFORMEN LÄSST



- 1. DER SELEKTIERTE THERMOPLASTISCHE LÖFFEL WIRD 1 MINUTE IN 70°C WARMES WASSER EINGETAUCHT**
 - 2. DANACH WIRD DER LÖFFEL MIT DER HAND INDIVIDUELL DEN ANATOMISCHEN GEGEBENHEITEN ANGEPAST**
 - 3. NACH ABSCHLUSS DER INDIVIDUALISIERUNG UND ABKÜHLUNG AUF RAUM-BZW. MUND-TEMPERATUR IST DER ABDRUCKLÖFFEL WIEDER VÖLLIG STABIL UND VERWINDUNGSSTEIF**
- ERSETZT AB 1 MAI 2008 DEN BIS DAHIN BEKANNTEN BORDER-LOCK® EINWEG-LÖFFEL
 - SPEZIELL FÜR PRÄZISIONSABDRÜCKE MIT DER EINPHASEN- ODER DER DOPPELMISCHTECHNIK
 - OPTIMALER STAUDRUCK IM ABFORMMATERIAL
 - BORDER-LOCK® ABDRUCKLÖFFEL SIND VON PROF. SCHREINEMAKERS ENTWICKELT



• Verformbare Löffel bezahnt

- Der Löffel während 1 Minute im Wasser ab 70° C
- Ideal ist ein Heiß-Wasser Bad von Dux Dental
- Alternativ hierzu Eintauchen in Schale mit Wasser aus Wasserkocher



- Man verformt den Löffel nach seiner gewünschten Form
- Die neue geformte Position etwa 5 Sekunden festhalten
- Den Löffel im Mund anpassen und eventuell erneut verformen
- Kühlen Sie vor der Abdruckname den Löffel mit kaltem Wasser

Praxis-Erfahrungen von Zahnärzten:

“Die verformbaren Löffel sind SUPER!! Der Gedanke um Einweg-Löffel selbst noch von Hand zu individualisieren ist einzigartig” Dr. van Thoor, Zahnarzt, Deutschland

“Ich bin sehr zufrieden mit dieser Evolution, weil ich immer mehr Patienten habe mit Tori Mandibulae”, Dr. Nolens, Zahnarzt, Belgien

“Der verformbare Löffel ist perfekt”, Dr. Brinkman, Zahnarzt, Amsterdam Universität

“Meiner Ansicht nach schließen diese Löffel ein Defizit im Markt. Sie sind von großem Nutzen in jeder Praxis, die Patienten mit Zahnprothetik versorgt”, Mr. Claassens, Zahnprothetiker, Australien

“Eine geniale und vor allem extrem praktische Sache, diese thermoplastischen verformbaren Abdrucklöffel,- Warum ist eigentlich kein Hersteller früher auf diese Marktlücke gestoßen?”
Dr. Markus Firla, Zahnarzt, Deutschland

Bestellmöglichkeiten für verformbare Border-Lock® Einweg-Abdrucklöffel:

| | | |
|-----------------------|---|--------|
| Art.Nr. 5400G | Probesatz 12 Löffel bezahnt /unbezahnt 1x bezahnt Nr. 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 1x unbezahnt nr. 22, 23, 32, 33 | 32,50 |
| Art.Nr. 5401G + 5402G | Einführungspaket mit 98 Löffeln bezahnt 1x Satz 10 OK + 1x Satz 8 UK und 8x Refill 10 Löffel der Nr. 42-45, 51-54 | 248,50 |
| Art.Nr. 6400G | Einführungspaket mit 40 Löffeln unbezahnt 1x Satz 5 OK + 5 UK und 30 Löffel der Nr. 21-25, 31-35 | 164,00 |
| Refill bezahnt: | 10 Löffel einer Nummer | 22,50 |
| Refill unbezahnt: | 5 Löffel einer Nummer | 16,25 |

Lieferbar über Ihr Dental Depot

CLAN



Clan Dental Products

Po.Box 2606 - NL-6026 ZG Maarheeze - The Netherlands

Tel +31 495593351 - Fax + 31 495593351

clan@xs4all.nl - www.borderlock.com